

Lolli-Selbsttest

NICHT ÖFFNEN

Ausnahme:

Wenn Sie von der Schule die Nachricht bekommen, dass Sie mit Ihrem Kind einen Selbsttest machen sollen.

| | |
|-----------|--|
| 1. | 1.1 Bei Mitteilung von der Schule Brief öffnen . 1.2 „ Auftragsschein Einzeltestung “ (DIN A4-Blatt) <u>vollständig ausfüllen</u> . |
| 2. | 2.1 Teströhrchen mit Einzeltupfer öffnen und ihr Kind 30 Sekunden an dem „Einzeltupfer-Lolli“ lutschen lassen. 2.2 Einzeltupfer wieder in das Teströhrchen stecken . |
| 3. | 3.1 „ <u>Auftragsschein Einzeltestung</u> “ <u>und das Teströhrchen</u> bis 09:00 Uhr zum Sekretariat bringen . |
| 4. | 4.1 Das Ergebnis können Sie mit einem Handy und dem barcodierten (QR-Code) DinA5- Informationszettel erfahren (<u>Mein-Laborergebnis.de</u>) 4.2 Bei einem positiven Ergebnis teilen Sie dies bitte auch der Schule mit. |

Bis im folgenden Nachtestungsverfahren geklärt werden kann, wer genau infiziert ist, **müssen alle Kinder dieser Gruppe zunächst zuhause bleiben (Distanzlernen)**.